



Der Augen-Notfallplan zeigt Ihnen leicht und übersichtlich, wie die Augenspülung bei unterschiedlichen Schmutz- und Schadstoffeinwirkungen erfolgen sollte.

Schmutz- und Schadstoffeinwirkung	Empfohlene Spülung	Empfohlene Spülzeit	Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung
Fremdkörper z. B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter	Plum Augenspüllösung	Augen ca. 5 Minuten ausspülen, bis Schmutzstoffe oder Fremdkörper herausgespült bzw. entfernt sind.	Plum Augenspüllösung
Säureschäden	pH Neutral	Augen ca. 2 Minuten ausspülen.	Plum Augenspüllösung
Alkalische Schäden	pH Neutral	Augen ca. 2 Minuten ausspülen.	Plum Augenspüllösung
Sonstige Schäden durch Chemikalien im Auge	Plum Augenspüllösung oder pH Neutral	Augen ca. 2 Minuten ausspülen.	Plum Augenspüllösung
Schäden durch Säuren, Alkali und Chemikalien auf der Haut	pH Neutral	Haut bzw. betroffene Körperteile solange spülen, bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist.	Plum Augenspüllösung



pH Neutral enthält eine 4,9% Phosphatlösung und wird insbesondere zur effektiven Neutralisierung von Säuren und Alkali eingesetzt.



Plum Augenspüllösung enthält eine 0,9% Kochsalzlösung, die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht.

Wichtig

Bei allen Verschmutzungen soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspülflaschen während des Spülvorgangs leicht drücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder- verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.

Schnelle und leichte Anwendung im Notfall:



Flasche aus dem Halter herausnehmen.



Augenschale in Pfeilrichtung drehen bis die Versiegelung bricht.



Kopf zurücklehnen und spülen.



Bei Fremdkörpern auch nur einfach nach vorne lehnen und spülen.